

Naziv

SloShield V-1000 Vizir - štitnik za lice



MADE IN
EU



Svrha upotrebe

Zaštitna oprema: za zaštitu lica od prskanja tekućina


Specifikacije

Nosač za višestruku upotrebu

Elastična traka

Providna folija vizira

Univerzalna veličina

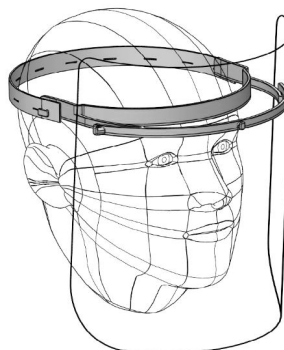


Elastična traka

Nosač

Providna folija vizira

min. 45 mm

NIVO OČI

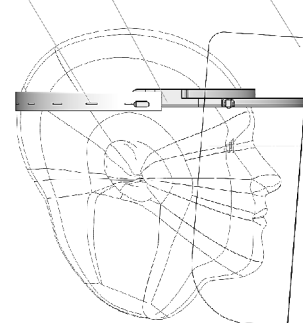


Upute za montažu

Skidanje zaštitne folije sa obje strane vizira.

Stavite vizir na nosač, kao prikazuju slike 1. i 2.

Staviti elastičnu traku na nosač, kao što prikazuje slika 3.

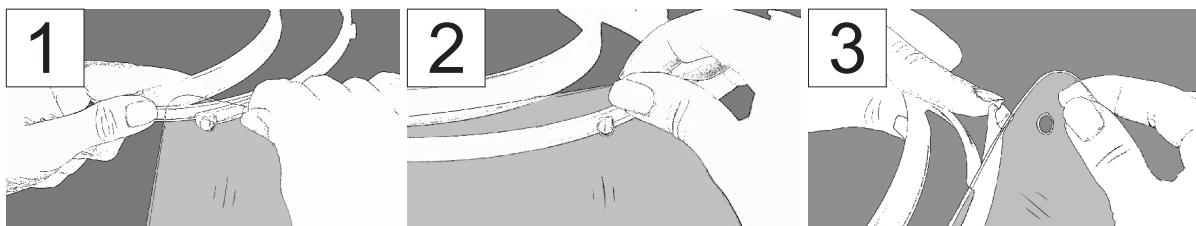

Čišćenje i
dezinfekcija

Prije svake upotrebe potrebno vizir i nosač očistiti.

Provjeriti stanje vizira, da nije oštećen.

Čišćenje vizira i nosača: sa toplom vodom, sa sapunom ili deterгентom.

Dezinfekcija vizira i nosača: sa sredstvom za dezinfekciju na osnovu etanola i uputa proizvođača.

Parna sterilizacija vizira i nosača: na vlastitu odgovornost.